


LUNOS® Powder Jet


LUNOSパウダージェット
歯科用歯面清掃器

クイックマニュアル

縁上用ノズル (スーブラ)

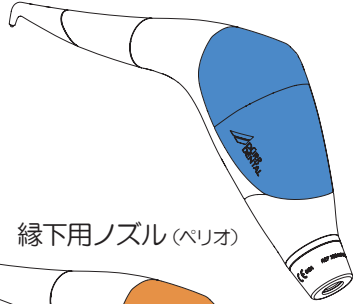

縁下用ノズル (ペリオ)

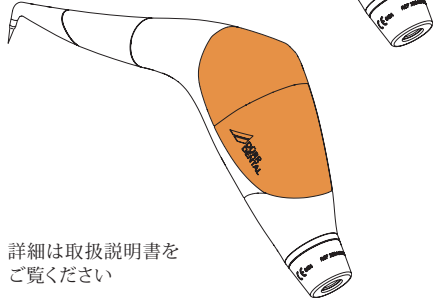

詳細は取扱説明書をご覧ください



使用前の準備 スーブラ&ペリオ

① パウダーコンテナを回転させて取り外します。

② 取り外したパウダーコンテナの蓋を回転させてから上部を取り外します。

③ 破損やひび割れしたパウダーコンテナは使用しないでください。

目視確認

④ パウダーコンテナが乾燥していることを確認します。

目視確認

Dry 水分

⑤ 最大充填量 (max) を超えないように充填してください。

最大充填量に注意してください

⑥ ネジ山やリングにパウダーの残留がないかを確認して、湿気から守るために必ず蓋は閉じてください。

⑦ コンテナ上部や吸引ノズルは、エアをよく当てて乾燥と清掃をします。

⑧ ストッパーを付けたまま10秒間空回しを行い、残留水分を除去します。

10秒

接続

⑨ パウダーコンテナを吸引ノズルに差し込み、本体の継マークとパウダーコンテナの三角印を合わせて装着します。

縁上用の使用方法 スーブラ

① 水流量の確認をします。

押す

② 噴射が同心円状かを確認。噴射が不規則な場合、詰まりまたは破損のため使用不可。

目視確認

③

- 手袋を着用する
- 保護眼鏡を着用する
- マスクを着用する
- 保護衣を着用する

ライト OFF ライト付きカップリングはオフにしてください。

④ 本機と吸引装置 (カニューレ等) は、同一の人が使用することで確実に吸引できます。

⑤ ノズルを歯面から3~5mm離して、円を描くように操作します。歯頸部から切端方向へ30~60度の角度で噴射します。

3-5 mm

30-60°

⑥

警告 気腫の恐れ
軟組織や歯肉溝に向けて噴射しないこと。

縁下用の使用方法 ペリオ

① 新しいペリオチップを滅菌パッケージから取り出します。

新品

滅菌不可

再使用禁止

使用後破棄

② ペリオチップをノズル先端の正しい位置に合わせて装着します。

③ ペリオチップは、再装着できません。

目視確認

④ ペリオチップの噴流を確認します。

押す

⑤

- 手袋を着用する
- 保護眼鏡を着用する
- マスクを着用する
- 保護衣を着用する

ライト OFF
ライト付きカップリングはオフにしてください。

⑥ 本機と吸引装置（カニューレ等）は、同一の人が使用することで確実に吸引できます。

⑦ ペリオチップをポケット底に挿入し、1~2mm上に引き上げます。

残存骨 3mm以上

残存骨 3mm以下

⑧ ペリオチップが歯周ポケットに入ったら、フットスイッチを5秒間動作させます。

円を描くように動かしながら操作します。

5秒間

⑨ ペリオチップの取り外しは、付属のレンチもしくは、プライヤー、医療廃棄用容器を使用します。

付属のレンチ

プライヤー

医療廃棄用容器

⑩ ペリオチップは滅菌出来ません。再使用禁止のため使用後は破棄します。

使用後破棄

滅菌不可

再使用禁止

毎回の使用後 スーブラ&ペリオ

① パウダーコンテナを空にします。エアを吹きかけて残った粉末を取り除きます。

② ノズルの水洗用アダプターを装着してシリンジで水を通します。

水洗 H₂O 10ml

エアで乾燥させ/清掃します。

③ ストッパーと洗浄除菌用アダプターを装着してシリンジで水を通します。

20ml

水洗 H₂O

④ お手入れの方法/再生処理 取扱説明書に従って再生処理を行ってください。

- 事前清拭
- 洗浄
- 消毒
- 乾燥
- 高圧蒸気滅菌

134°C

⑤ メンテナンス 本体のOリングは約3ヶ月毎に交換してください。取扱説明書を参照。

1 2 3

本体用 Oリング、装着ツール

⑥ メンテナンス パウダーコンテナのOリング等は約3ヶ月毎に交換してください。取扱説明書を参照。

1 2 3

パウダーコンテナ用 シリコン封、Oリング