

LUNOS® PROPHY POWDER GENTLE CLEAN

ルノスプロフィーパウダー ジェントルクリーン
PMTTCパウダー

特性

デュールデンタルのルノスプロフィーパウダージェントルクリーンは、素早く効率的な歯肉縁上の歯面清掃と着色除去に使用します。革新的な研磨粒子「トレハロース」で歯面を守りながらもしっかりと汚れが落とせます。粒子サイズ約65μm。水溶性が高く、患者さんの口腔内にパウダーが残らないため口腔粘膜の乾燥および不快感はフリー。また、デンタルユニットや配管内に残らないため、ユニットの機能を損ないません。わずかな甘味度を持つ「トレハロース」は、口腔内で糖代謝されない非う蝕性の糖パウダーです。

成分

ニュートラル

「Neutral」トレハロース、添加剤

オレンジ

「Orange」トレハロース、添加剤、オレンジ香料（リモンネを含む）

スペアミント

「Spearmint」トレハロース、添加剤、スペアミント香料（リモンネを含む）

ワイルドベリー

「Wild Berry」トレハロース、添加剤、ベリー香料（リモンネを含む）

使用方法

使用する前にボトルを振ってください。初回使用時は容器の蓋を外し、開封防止シールを取り外し蓋を戻します。パウダーをコンテナに充填する前に、必ずコンテナ内部が完全に乾燥している事を確認し、コンテナの最大充填量を超えないように注意しながら充填します。充填時に発生する粉塵を最小限に抑えるため、容器の注ぎ口を使用してボトルを軽く抑えながら充填してください。敏感な皮膚を保護するため、治療開始前に患者の唇にワセリンを塗布してください。治療終了後、湿らせた使い捨ての布（例：Lunos® Prophy Wellness Cloth）で患者の顔をきれいにしてください。



特徴

- 革新的な研磨粒子「トレハロース」
- 粒子サイズ約65μm
- わずかな甘味度（砂糖の約45%）
- 口腔内で糖代謝されないため非う蝕性
- 水溶性が高く、口腔粘膜の乾燥と不快感フリー
- デンタルユニットや配管内に残らないため、機能を損ないません
- 片手で操作可能なフリップトップ
- 4つのフレーバー（ニュートラル、スペアミント、オレンジ、ワイルドベリー）
- 動物性由来成分、グルテン、乳糖、果糖非含有

弊社では社内外における綿密な科学的研究に基づき、最新情報に従って薬品類に対する推奨を行っています。これに関する責任範囲が記された「一般販売および納品における免責条項」をお求めの場合は、弊社までご連絡ください。

適用例

- 歯肉縁上の着色除去やブラークの除去
- 以下の施術前の歯面準備およびクリーニング
 - 矯正ブラケット装着
 - フッ化物塗布
 - ホワイトニング
 - レジン充填および補綴物セット
 - シーラント
- 歯石除去には使用できません
- エナメル質の調整には使用できません
- 小児から成人まで使用可能です

使用上の注意

パウダージェット装置が補綴物や充填物に直接当たらないように注意してください。治療中にスプレーノズルを歯肉に向けしないでください。軟組織に直接噴射すると、歯肉を損傷することがあります。組織内に気腫が発生したり、血液中に空気が入って塞栓症を起こしたりするおそれがあるため、パウダージェットノズルを歯肉ポケットに直接当てないでください。治療終了後2〜3時間以内に食べ物や飲み物（お茶、コーヒーなど）を摂取すると、再び歯が変色することがあります。

禁忌

慢性気道疾患（気管支炎や喘息など）の患者は、エアロゾルに含まれる粉体が呼吸困難を引き起こす可能性があるため、パウダーを使用した歯面清掃機を使用した治療をしないでください。また、本製品は、エナメル質損傷部、エナメル質形成不全、ホワイトスポットには使用しないでください。場合によっては、パウダーに含まれる香料が皮膚刺激やアレルギー反応を引き起こす可能性があります。このため、香料に対するアレルギーのある患者には、「ニュートラル」を使用してください。

廃棄方法

内容物／容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。

物理的データ

パウダーの外観

ニュートラル
「Neutral」白色

オレンジ
「Orange」白色

スペアミント
「Spearmint」白色

ワイルドベリー
「Wild Berry」白色

容量

180g

使用期限

以下の保管条件の場合、
未開封 製造から36か月
開封後 開封から12か月

保管

温度 0〜25℃

湿度 10〜75%

湿気の吸収を防ぐため、パウダーを使用後はすぐに容器の蓋をしっかりと閉めてください。湿気や明るい光の当たらない風通しのいい場所で保管してください。直射日光に当てないこと。

一般注意事項

ルノス®プロフィーノパウダー「ジェントルクリーン」は医療機器です。この製品は、歯科医院でのプロフェッショナルケアの用途でのみ使用することが可能です。ご使用前に、歯面清掃機の操作方法を確認してください。施術の際は、施術者と患者共にゴーグルなどの適切なPPE（個人保護具）を使用してください。スプレーミストが発生するため、施術中は適切な吸引装置を用いて吸引を行うこと。「デュールデンタルカニューレ」の使用を推奨します。動物性由来成分、グルテン、乳糖、果糖非含有。施術後ユニットに飛散したパウダーは、湿った布で清掃してください。

安全上の注意事項

飲み込まないこと。目に入らないように注意し、万が一目に入った場合は水で十分に洗い流してください。