

# Bioclean バイオクリーン

吸引システムの洗浄除菌

## 毎日の洗浄除菌

「バイオクリーン」は吸引システムとユニットチェア内の配管や分離器の除菌、消臭、洗浄に使用します。作用範囲：バクテリア、結核菌、真菌類、ウイルス



毎日1～2回、昼休み前や診療終了後に洗浄除菌を行ってください。

アルカリ性



使用前に製品のボトルラベルを読んでください。MD555 フロークリーナーを使用した場合、4時間以上あけてバイオクリーンを使用してください。

# MD555 cleaner フロークリーナー

吸引システム強力洗浄

## 週2回の洗浄

「MD555 フロークリーナー」は、吸引システムとユニット内の配管や分離器の強力洗浄に使用します。歯面清掃パウダーやペースト、配管内の沈殿物、固着物、付着物に強い効果を発揮し、詰まりを防ぎます。



週に2回、昼休み前に洗浄を行ってください。パウダージェットを頻繁に使用している場合、または使用状況により汚れがひどい場合は、毎日洗浄を行ってください。

酸性

# OroCup オロカップ

専用容器

オロカップはバイオクリーンおよびMD555フロークリーナーでのメンテナンスを行うときに使用します。

カニューレ（バキュームチップ）などをバキュームハンドピースから取り外し、キャップ内に対応する吸引アダプターを取り付け接続します。1本から3本まで同時に吸引できます（手順下記参照）。



※取外し：側面を押す／取付：接続部分に合わせて押す

### 1 水で下洗い



より高い効果を得るため、洗浄除菌作業前に各ユニットで2ℓの水を吸引させます。

### 4 スピットンへ注入




スピットンへ、残りの希釈液1ℓを流してください。

### 2 希釈液を作製



キャップを外して、オロカップに水と濃縮液を入れます（上の表を参照）。キャップを戻し、オロカップを少し振って混ぜてください。

### 5 作用時間

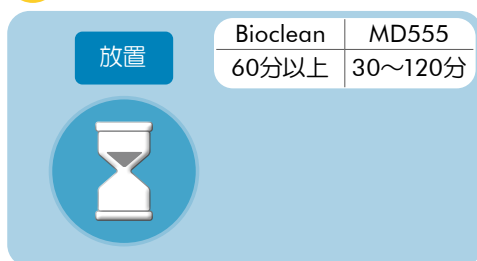

Bioclean：60分以上放置してください。次回の診療時に⑥を行っても構いません。  
MD555：酸性薬液のため、30分～120分以内に必ず⑥を行ってください。

### 3 希釈液を吸引



バキュームと排唾管のハンドピースをオロカップに差し込み、ユニットに希釈液1ℓを吸引させます。

### 6 仕上げの水洗い



ユニット1台につき水2ℓを吸引させてください。スピットン下の配管にも水を1ℓ以上流してください。