




DÜRR
DENTAL

MD555 cleaner

フロークリーナー

吸引システム強力洗浄

Special cleaner for suction system

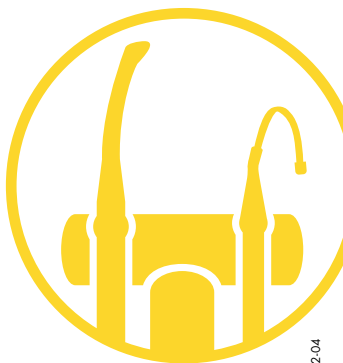

濃縮液

2.5L

MD555 フロークリーナー

吸引システム強力洗浄

歯科用吸引システムの配管専用無発泡性クリーナーです。特殊成分が歯面清掃パウダーや PMTC ペースト、切削片などの歯科材料のこびりついた汚れを溶かし徹底洗浄します。定期的なご使用でユニットと配管の詰まりを防ぎます。

【使用方法】 ●専用容器「オロカップ」で希釈液を作ります。黄色のボトルキャップの内線 5 杯 (100mL) の原液とオロカップ側面 2L の線まで水を入れるとユニット 1 台分の 20 倍希釈液ができます。●ユニット毎に、バキュームと排唾管には 1L の希釈液を吸引させ、スピットンにも 1L 流してください。●週 2 回、昼休み中の 1~2 時間 (最低でも 30 分) 放置して 2L の水ですすいでください。注意：液を作用させたまま一晩中置かないでください。●「MD 555 フロークリーナー」を初めて使用する場合、汚れが堆積している吸引システムには、10 倍の希釈液 (キャップ 10 杯 + 水 2L) を吸引させます。最初の一週間は毎日 10 倍、次の 1~2 週間は 20 倍希釈液をご使用ください。●バイオフィルム除去と除菌には、オロトルプラス/バイオクリーンのご使用をおすすめします。効果を弱めないために「MD 555 フロークリーナー」使用の前後約 4 時間の間隔を空けてください。●注意：アルミや真鍮など酸に弱い材質には使用できません。床などにこぼした際は拭き取ってください。

【取扱注意】 ●使用前にラベルをよく読むこと。●眼、皮膚、衣類につけないこと。●保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。●皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。●希釈濃度と推奨作用時間を守ること。●他の洗浄液や石鹼と混ぜないこと。●容器を密閉して、小児の手の届かない換気の良い場所で保管すること。●濃縮液を排水に流さないこと。容器はすすいで処分すること。内容物/容器は都道府県、又は市町村の規則に従い廃棄すること。◎使用期限は側面に記載 (年/月)

20倍希釈

2L 希釈液

キャップ

5 杯

20mL



警告

成分:リン酸 CAS 番号 7664-38-2



強い眼刺激

皮膚刺激

デュール デンタル

DÜRR DENTAL (ドイツ)

produced by orochemie GmbH & Co KG

[www.duerr.co.jp/
md555](http://www.duerr.co.jp/md555)

