


DÜRR DENTAL | VistaScan Combi View

パソコンを使用して画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル 1/3

詳細は取扱説明書をご覧ください

デンタル


1

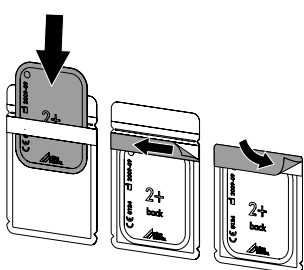

IPを保護カバーに入れ、封をする


2

撮影前

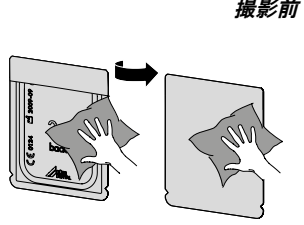

撮影前: 保護カバーの消毒


3

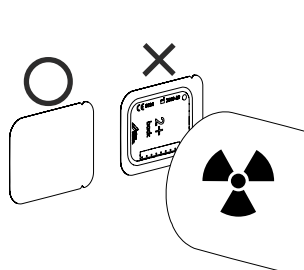

感光面(水色)をチューブ側に


4

撮影後

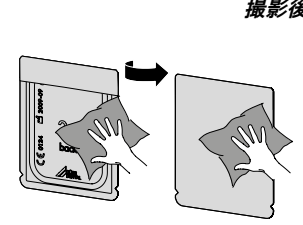


撮影後: 保護カバーの消毒・乾燥

5



1. カルテの選択 → 「レントゲン」


6



3. 種類の選択 → 「モード」の選択 → 「読み取り」ボタンをクリック


7

ポイント!
カバーを消毒・乾燥してから




保護カバーを真っすぐ開封

8

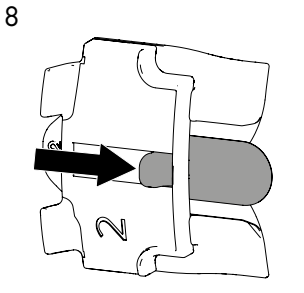


カセットのパットを出す

9

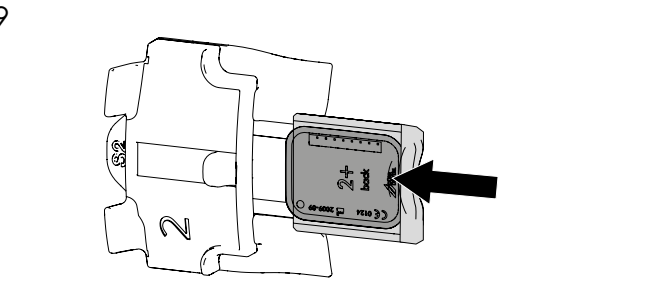


保護カバーから押し出し、IPをカセットに差し込む

10

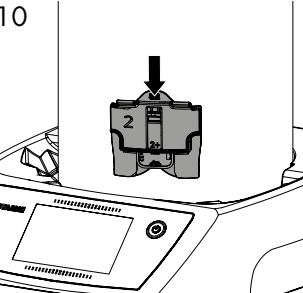

カセットを差込口に入れる


11

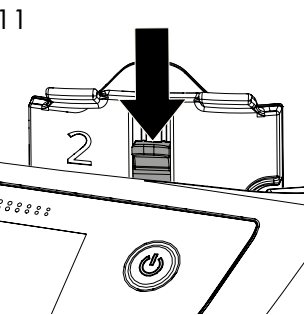

レバーを下げてIPを挿入


12

ポイント! スキャン作業が終わったら、「終了」ボタンをクリック

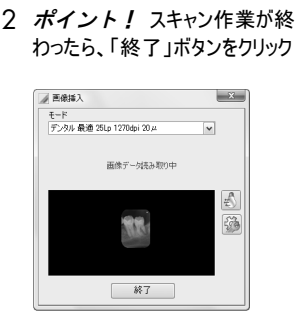

ダイアログで読み取り状態確認

13

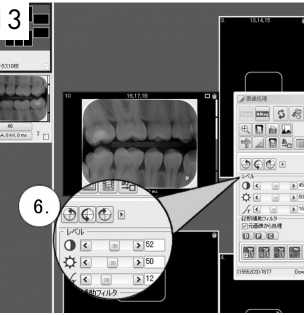


6. 画像の向き、明るさなどを調整

14

7. 種類の確認

8. 保存



画像種類の選択 → 保存




パソコンを使用して画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル 2/3

詳細は取扱説明書をご覧ください


パノラマ/セファロ

1

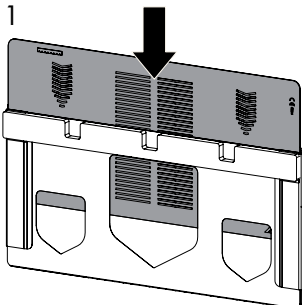


IPをソフトカセットに入れる

2

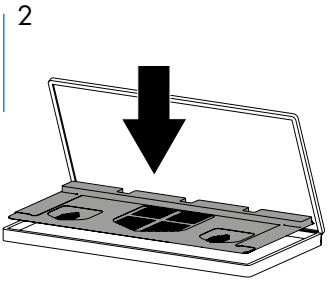


ソフトカセットを装置のカセットに挿入

3

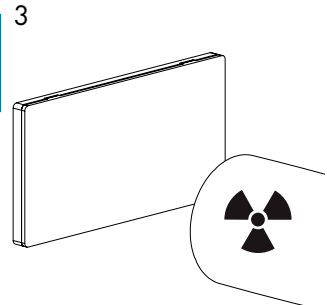


感光面(水色)がチューブ側に撮影します

4




「カルテ」を選択 → 「レントゲン」

5



撮影種類の選択 → 「モード」の選択 → 「読み取り」ボタンをクリック


6

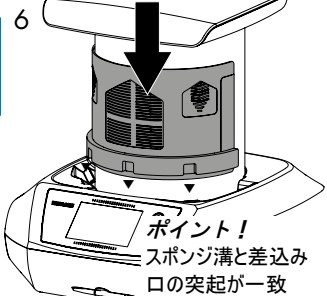

ポイント！
スポンジ溝と差込み口の突起が一致

ソフトカセットを差込み口にセット


7

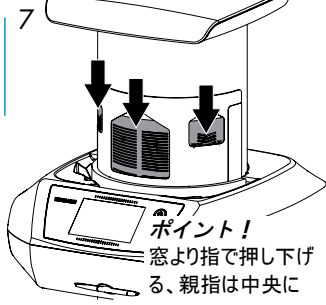

ポイント！
窓より指で押し下げる、親指は中央に引き込まれるまで指で押します


8

ポイント！ スキャン作業が終わったら、「終了」ボタンをクリック

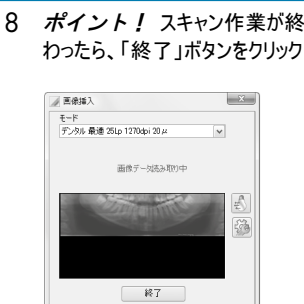


ダイアログで読み取り状態確認

9

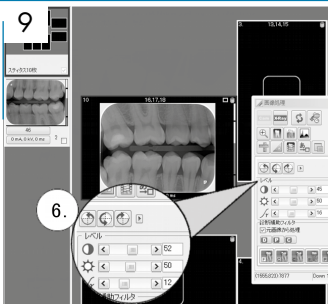

6. 画像の向き、明るさなどを調整

10



7. 種類の確認

8. 保存

画像種類の選択 → 保存

機器本体のタッチスクリーンから画像データ読み取り作業 | クイックマニュアル 3/3

タッチスクリーンで読み取り作業を行う場合の異なる手順を記載しております。他の操作は上記または取扱説明書をご覧ください。

全フォーマット

a



「読み取り」、「デンタル高速」又は「パノラマ高速」を選択します。少なくともカルテ番号を記入することをお勧めします。

b



IP挿入準備完了の画面が表示されたら、IPを挿入口に差し込んでください。

c



左下ボタンで向きや明るさを調整し、画像を保存してください。