


JP バイトプロテクター

内容

100枚セット2130-074-03

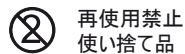

再使用禁止
使い捨て品

使用方法

オクルーザルのイメージングプレート(サイズ4)を使用してレントゲン撮影を行う場合、バイトプロテクターをご使用になることをお勧めします。バイトプロテクターには、患者さんがイメージングプレート(IP)を噛んでしまった場合に傷がつかないように保護する役目があります。

レントゲン撮影の際に、保護カバーに入っているIPをバイトプロテクターで挟んでから口の中に置いてください。

図1～2: 保護カバーにIPを入れ、閉じます。

図3～4: バイトプロテクター紙をエンボスラインに沿って折ります。

図5: 保護カバーの端を折り曲げます。

図5: 保護カバーに入ったIPをバイトプロテクターに挟みます。

患者の口の中に入れて画像を撮影します。

